

Kategori **Voksfilter**

Oticon ProWax miniFit

Model/Varenr.: 128057

50,00 kr

Funktioner:

Beskyttelse til Oticon høreapparater
Lille størrelse filter beregnet til Oticon
minifit recievere.

Pakken indeholder:

6 stk. Oticon ProWax MiniFit Voksfiltere

Kompatibilitet: Oticon MoreOticon

OPN S

Oticon Siya

Oticon OPN

Oticon Como

Oticon Alta

Oticon Nera

Oticon Ria

Oticon SenseiSådan skiftes et Oticon

ProWax miniFit voksfilter 1. Værktøj

Fjern værktøjet fra skallen. Værktøjet har to

stifter, entom til at fjerne filteret medog

én til at isætte det nye. 2. Tag det ud Sæt

den tomme stift ihøjtaleren på

høreapparatetog træk filteret ud. 3. Indsæt

voksfilter Indsæt det nye voksfilter

medden anden stift, fjernværktøjet og

kassér det. 4. Til sidst Højtaleren skal

se ud som vistherover, når du har

udskiftetvoksfilteret.

Køb Oticon voksfilter hos os og vær

sikker på at få originale Oticon dele.

