


# PerfectDry Lux®

Hurtig affugtning af dine høreapparater med 360° UV-C stråling

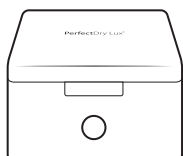


## Denne pakke indeholder:

- 1 stk. PerfectDry Lux®
- 1 stk. USB-stik
- 1 stk. strømforsyning
- 1 stk. brugervejledning


## Brugervejledning

### 1 Tilslut PerfectDry Lux®.

Det blå lys fortæller, at der er strøm på, og såfremt du intet foretager dig, vil lyset automatisk slukke efter 30 sek.

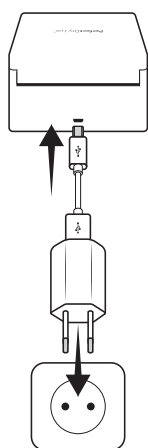


- ### 2 Rens dine høreapparater som du plejer at gøre. Åbn batteriskufferne på dine høreapparater. Batterier må gerne blive i høreapparater under tørreprocessen. Luk låget på boksen.

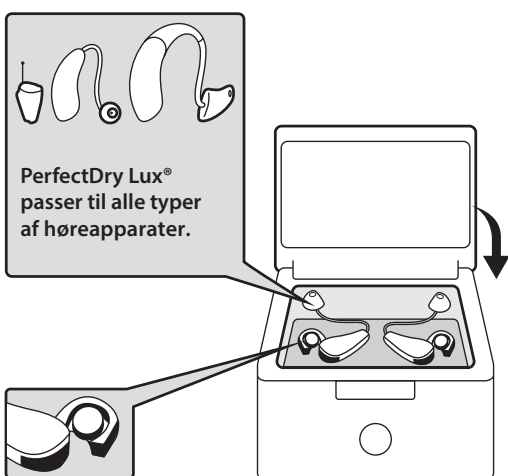


- ### 3 Tryk en enkelt gang på knappen for at starte tørreprocessen. Det blå lys vil blinke langsomt og processen er i gang. Tørring vil kun finde sted når låget er lukket og vil afsluttes efter 30 min.

PerfectDry Lux® vil automatisk stoppe og det blå lys vil slukke.

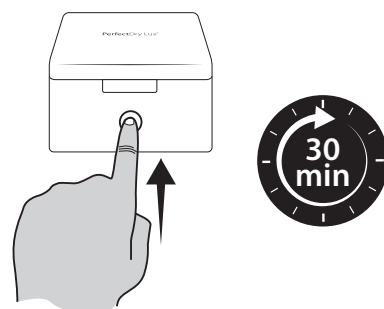

- ! Tjek, at låget på boksen er lukket. Åbner man låget under processen, vil PerfectDry Lux® af sikkerhedsmæssige årsager stoppe, og man må starte forfra.

- ! Hvis blåt lys **BLINKER** er tørring i gang. Hvis blåt lys er **KONSTANT**, er boksen i standby.

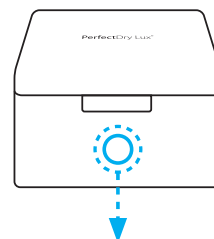

# PerfectDry Lux®

## Funktionsdetaljer 360° UV-C stråling

PerfectDry Lux® har en kortbølget UV-C-lampe, som dækker over hele høreapparatets overflade takket være en 360° udformning.

Høreapparaternes eksponering for UV-C-stråling reducerer kløe og irritation i øregangen betydeligt.

## Affugtning

PerfectDry Lux® har et patenteret affugtningssystem, som affugter høreapparaterne ved hjælp af luft. Det er med til at reducere tørretiden samt mængden af strøm, der bruges på affugtningen. Temperaturen i boksen er kontrolleret af et elektronisk system for at kunne opnå maksimal temperatur på 45°C, uanset rumtemperaturen. Derved forhindres det, at høreapparaterne tager skade under affugtningen. Det anbefales, at PerfectDry Lux® bruges dagligt for at opretholde høreapparaternes optimale kvalitet.

## Gældende direktiver

Tørreboksen lever op til kravene i direktiv 93/42/EEC for medicinsk udstyr.

## Tekniske data

### Funktioner

Indvendig (lxbxd):	70x21x51 mm
Udvendig (lxbxd):	93x48x76 mm
Vægt (g):	144 g
UV-lampe:	253,7 nm
Max. strøm:	4W
Standby-strøm:	0,04W
Software:	ØØ PDL-LOG-02.00

Opbevaringstemperatur mellem -20°C til +65°C

Antal cyklusser: 1

Tørretemperatur:	<45°C
Cyklusvarighed:	30 min.
Omgivende temperatur under cyklus:	Fra 12°C til 40°C

### Strømforsyning

Input:	100-240Vac 50-60Hz
Output:	5Vdc
Stik:	USB-kabel - mikro USB

## Identifikationer

Disse informationer er at finde på din PerfectDry Lux®


**V** Volt (strømforsyningsspænding)

**A** Ampere (strømforbrug)

 USB strømforsyningssymbol

 Indendørs brug

 Produktet er lavet af ABS med genbrugskode nr. 7

 Produktet er kompatibelt med alle europæiske enheder gældende for medicinsk udstyr

 Bortskaffes som elektronisk udstyr

## Sikkerhedsinstruktioner

PerfectDry Lux® må ikke benyttes af personer med svækkede kognitive funktioner. Derudover er der ingen gældende krav til brugeren.

Opbevares utilgængeligt for børn. Brugeren bør kun varetage den almindelig rengøring af PerfectDry Lux®. Alt andet vedligehold eller reparation skal foretages af en professionel.

Placer ikke PerfectDry Lux®, strømforsyningskablet eller stikket i vand eller nogen anden form for væske. Brug ikke systemet, hvis strømforsyningskablet eller stikket er beskadiget. Udskift din netadapter med en original model.

Stil PerfectDry Lux® på en flad, tør og stabil flade. Se ikke direkte på tørreboksens UV-C-lampe. Træk i stikket, og ikke i kablet, når systemet frakobles.

Brug aldrig vaskemidler eller ætsende produkter under rengøring af PerfectDry Lux®. Der gives ingen garanti, såfremt disse anvisninger ikke følges. Producenten kan ikke stilles ansvarlig for skader forårsaget af forkert brug eller håndtering.


## Rengøring

Brug en blød klud til at rengøre produktet. Systemet tåler ikke slibemidler eller spray-væsker, som trænger ind i systemet.

Hold PerfectDry Lux® lukket, når systemet ikke anvendes, for at undgå aflejring af skidt.

## Garanti

2 års reklamationsret (kabel og transformer er ikke inkluderet). Skulle systemet blive defekt, kontakt da din hørespecialist. Garantien gælder ikke for defekter, som er forårsaget af uheld eller en utilsigtet hændelse grundet brug af væsker, uagtsomhed, uegnet brug, demontering af enhver art, manglende pleje eller lignende, som er forårsaget af brugeren. Derudover dækker garantien ikke, hvis defekten skyldes lynnedslag eller en anden form for strømudsving. Som en sikkerhedsforanstaltning anbefales det, at PerfectDry Lux® frakobles strømforsyning under tordenvejr.

 Sluk for PerfectDry Lux®, når den ikke er i brug - for at beskytte miljøet.

 MG Développement • ZA aéroport de Montpellier • 34470 Pérols • Frankrig