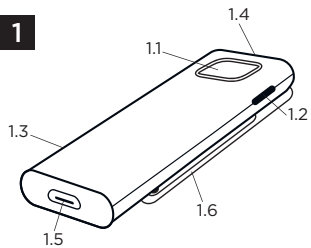
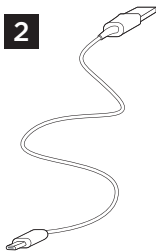
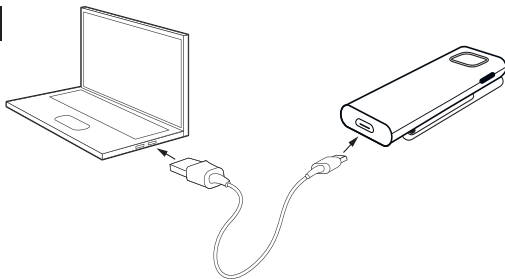



DEX™

DK


COM-DEX
Remote Mic

1**2****3**

4

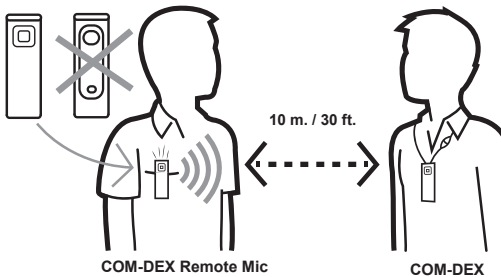

5

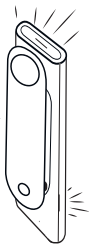

BESKRIVELSE AF ENHEDEN - se illustration 1

1.1 Streamingknap

1.2 Tænd/sluk-knap

1.3 Lysdiode

1.4 Mikrofon og lysdiode

1.5 Opladningsport

1.6 Klips

Påtænkt anvendelse

COM-DEX Remote Mic er en mikrofon med integreret radio til transmission af lyd til en COM-DEX, der er tilsluttet brugerens høreapparat(er). Målet er at forbedre høreapparatbrugerens evne til at høre tale i vanskelige lyttesituationer. **For at opnå optimal konnektivitet skal enheden og COM-DEX være inden for hinandens synsfelt.**

BEMÆRK

Din Remote Mic er kun beregnet til brug sammen med en COM-DEX.

Tilbehør - se illustration 2

USB-kabel

BRUG AF ENHEDEN

Opladning af enheden - se illustration 3

Tilslut USB-kablet til enheden og strømforsyningen. Det tager ca. 3 timer at oplade enheden.

BEMÆRK

Før du kan bruge enheden, skal USB-kablet frakobles.

Batterilevetid: 8 timers streaming.

Tænd og sluk for enheden

Tænd for enheden:

- Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede i 3 sekunder.

Sluk for enheden:

- Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede i 3 sekunder.

Enheden slukker automatisk, hvis den ikke har streamet lyd i mere end 30 minutter.

Parring af enheden

Parring af enheden med COM-DEX

Første gang du parrer enheden med COM-DEX, skal du følge disse trin:

1. Sørg for, at COM-DEX er i parringsindstilling.

2. Tænd for enheden. Første gang du gør dette, sættes enheden til paringsindstilling, og den tilsluttes automatisk til COM-DEX. Det kan tage nogle få minutter.

BEMÆRK

Når du først har parret enheden med COM-DEX, bliver den ved med at være parret og tilsluttes automatisk, hvis COM-DEX er tændt.

Sådan nulstilles COM-DEX Remote Mic til en ny parring:

1. Tænd for enheden.
2. Nulstil enheden til fabriksindstillinger ved at trykke på begge knapper i 5 sekunder. Enheden sættes til parringsindstilling.
3. Følg parringsproceduren som beskrevet ovenfor.

Brug af enheden - se illustration 4

Fjern den beskyttende film, før du tager enheden i brug.

Anbring enheden på skjortekraven af den person, du gerne vil høre.

Tænd for enheden.

Streaming startes og stoppes ved at trykke på streamingknappen på Remote Mic. Mens du streamer, lyser lysdioden grønt.

BEMÆRK

Hvis du ønsker at betjene enheden via COM-DEX appen, skal appen opdateres.

Lydregulering

Den lyd, der streames fra enheden til COM-DEX, kan justeres i 3 niveauer. Tryk på tænd/sluk-knappen på siden af enheden for at ændre lydniveauet i en tretrinscyklus (højeste niveau – laveste niveau – tilbage til normalt niveau).

Visuelle indikatorer - se illustration 5

Enheden har to lysdioder, der blinker med forskellige farver. Formålet med disse farver er at informere dig om, hvilken indstilling enheden er i på ethvert givet tidspunkt.

- Konstant rødt lys fra **den nederste** lysdiode: Enheden oplader.
- Konstant grønt lys fra **den nederste** lysdiode: Enheden er fuldt opladet.
- Blinkende blå-rødt-blå-rødt lys fra **begge** lysdioder: Enheden er klar til at blive parret.
- Blinkende blå lys fra **den øverste** lysdiode: Enheden er tændt, men der er ingen forbindelse til den parrede COM-DEX.
- Blinkende grønt lys fra **den øverste** lysdiode: Enheden er tændt og tilsluttet COM-DEX, men den streamer ikke.
- Konstant grønt lys fra **den øverste** lysdiode: Enheden er tændt og streamer.
- Periodisk blinkende rødt lys fra **begge** lysdioder: Batteriniveauet er lavt.

Vedligeholdelse

- Rengør enheden med en fugtig klud. Brug ikke væske eller kemikalier, og læg den ikke i væske.
- Når enheden ikke er i brug, skal den opbevares på et tørt sted, hvor børn og kæledyr ikke kan få fat i den.
- Forsøg aldrig selv at åbne eller reparere udstyret. Dette må kun udføres af autoriserede teknikere.

FEJLFINDING

Problem	Mulig årsag	Løsning
Enheden virker ikke	<ol style="list-style-type: none">1. Lavt batteriniveau i Remote Mic2. Lavt batteriniveau i COM-DEX3. Uden for rækkevidde	<ol style="list-style-type: none">1. Oplad batteriet i Remote Mic2. Oplad COM-DEX3. Hold enhederne inden for hinandens synsfelt og inden for deres rækkevidde (op til 10 m)
Ingen lyd	<ol style="list-style-type: none">1. Ikke parret med COM-DEX2. COM-DEX er uden for høreapparaternes rækkevidde3. Lavt batteriniveau i høreapparater	<ol style="list-style-type: none">1. Gentag parringsprocessen2. Stil dig inden for rækkevidde3. Udskift batterierne i høreapparaterne

Hvis problemet stadig er til stede, så kontakt høreklinikken. Flere oplysninger kan fås på www.widex.com

Advarsler



Brug ikke enheden i miner eller andre områder med eksplosive luftarter.



Må ikke udsættes for kraftig varme/kulde eller høj fugtighed.



Når enheden anvendes sammen med udstyr, som er tilsluttet via et mikro-USB-kabel, f.eks. en oplader, en PC, en lydkilde eller lignende, skal sikkerhedsreglerne for dette udstyr overholdes, som angivet i IEC 60065, IEC 60950-1, IEC 60601-1 eller tilsvarende standarder.

REGULATORISK INFORMATION

Direktiv 1999/5/EF

Undertegnede Widex A/S erklærer herved, at følgende udstyr COM-DEX Remote Mic overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

En kopi af Overensstemmelseserklæringen kan findes under:

www.widex.com/doc.



N26346

Oplysninger om kassering

Høreapparater, tilbehør og batterier må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald.

Høreapparater, batterier og høreapparattilbehør skal bortskaffes på steder, der er tiltænkt affald af elektrisk og elektronisk udstyr, eller afleveres til din høreklub til sikker bortskaffelse.

SYMBOLER

Symboler, som ofte anvendes af Widex A/S på pakkematerialet (etiketter, brugsanvisninger mv.) til medicinsk udstyr

Symbol	Titel/beskrivelse
--------	-------------------



Producent

Sammen med dette symbol angives navn og adresse på den producent, der har produceret produktet. Såfremt det er relevant, angives produktionsdatoen også.



Katalognummer

Produktets katalognummer (varenummer)



Se brugsanvisningen

Brugsanvisningen indeholder vigtig sikkerhedsinformation (advarsler/forholdsregler) og skal læses, inden produktet tages i brug.



Advarsel

Tekst markeret med et advarselssymbol skal læses, inden produktet tages i brug.

Symbol **Titel/beskrivelse**



WEEE-mærke

"Må ikke kasseres som almindeligt affald"

Når produktet skal kasseres, skal det sendes til et autoriseret indsamlingssted for genbrug og genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr for at minimere risikoen for miljøet og for menneskers sundhed som følge af tilstedeværelsen af farlige stoffer.



CE-mærke

Produktet overholder kravene i EU-direktiverne for CE-mærket udstyr.



RCM-mærke

Produktet overholder de gældende elektriske sikkerhedskrav og regulatoriske krav til EMC og radiospektrum for produkter, som distribueres til Australien og New Zealand.



Interferens

Elektromagnetisk interferens kan forekomme i nærheden af produktet.



WIDEX A/S

Nymoellevej 6, DK-3540 Lyngby, Denmark
www.widex.com

Manual no.:
9 514 0380 080 #02
Issue:
2016-09



9 514 0380 080 02